


MyStar SylkFeel®

Sterile Lanzetten für den persönlichen Einmalgebrauch zur Verwendung mit einer Stechhilfe für die Kapillarblutentnahme durch Laien.

Medizinprodukt

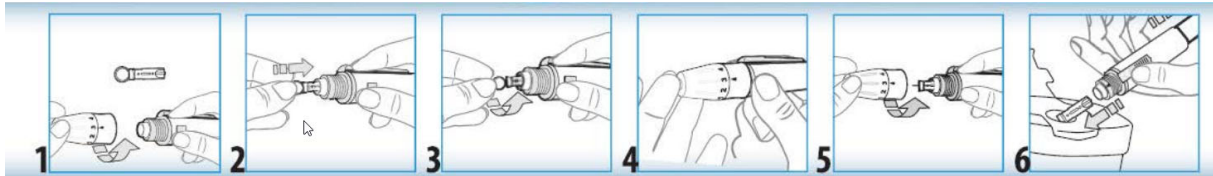

Gebrauchsanweisung:

Die Gebrauchsanweisung Ihrer Stechhilfe beachten. Hände vor und nach dem Testen immer mit Seife und Wasser waschen und gut abtrocknen.

1. Drehen Sie die verstellbare Kappe der Stechhilfe ab.
2. Setzen Sie eine neue, sterile Lanzette in die Stechhilfe ein.
3. Drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette ab.
4. Führen Sie eine Punktion aus, wie von Ihrem medizinischen Fachpersonal empfohlen.
5. Drehen Sie die verstellbare Kappe nach Gebrauch von der Stechhilfe ab.
6. Die Lanzette aus der Stechhilfe auswerfen.

Benutzte Lanzette sicher gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.



WARNHINWEIS:

Infektionen vermeiden. Darf NIEMALS von mehr als einer Person verwendet werden! Nur zur Einmalanwendung, Lanzetten nicht wieder verwenden oder in der Stechhilfe aufbewahren. Die Schutzkappe ist ein einfaches Sterilbarrieresystem. Nicht verwenden, wenn die Schutzkappe beschädigt ist oder fehlt.

Für Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen unzugänglich aufbewahren.

Bei gesundheitlichen Bedenken wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal.

Jeden schwerwiegenden Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, dem Hersteller bzw. den örtlichen zuständigen Behörden melden.

Es wird empfohlen, MyStar SylkFeel®-Lanzetten mit der MyStar SylkFeel®-Stechhilfe zu benutzen.














MyStar SylkFeel®-Lanzetten können mit folgenden Stechhilfen angewendet werden:

Autolet® Impression, droplet®, Simple Diagnostics®, Microlet® 2, Easy Touch®, FreeStyle, my life Softlance, TRUEdraw™, ReliOn™ Lancing Device, SteriLance™, ADVOCATE®, Glucoject® Dual Plus, On Call® Stealth® Lancing Device, Microlet® next, Bionime Lancing Device, Mini Lancing Device, CareTouch™, Genteel® lancing device, Blood Lancet Pen Painless Sterile Gold Plated, iHealth®, OneTouch UltraSoft, Autolet® Plus, Pic Digitest benutzt werden.

Erhältlich in zwei Varianten: 28 G/33 G

Referenzen gemäß ISO 15223-1 Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller bereitzustellenden Informationen.

Symbolverzeichnis:

Bezeichnung des Symbols	Symbol
Chargenbezeichnung:	
Hersteller:	
Verwendbar bis	
Strahlensterilisites/Einfaches Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung	
Katalognummer	
Nicht wiederverwenden	
Gebrauchsanweisung beachten	
Achtung!	
Eindeutige Produktidentifizierung	
Medizinprodukt	
Nicht erneut sterilisieren	
Erklärung der sonstigen Symbole	Symbol
CE-Zeichen	
Wiederverwertbares Verpackungsmaterial	



Hersteller:

HTL-STREFA S.A.

ul. Adamówek 7

95-035 Ozorków

Polen

Tel.: +48 42 270 00 10

Fax: +48 42 270 00 20

www.htl-strefa.com

E-Mail: info@htl-strefa.pl

Hergestellt in Polen

©2024 Sanofi