

	Moorkissen Produktspezifikation	Nr. 01_02_03_01 Version: 04
---	--	--

Allgemeine Informationen	
Name des Unternehmens:	SonnenMoor Verwertungs- u. Vertriebs- GmbH
Adresse:	Landstraße 14 5102 Anthering Österreich
Hersteller	trendmoor Manufaktur GmbH & Co.KG Meinsdorfer Str. 31c 0912 Limbach-Oberfrohna, Deutschland

Produktbeschreibung	
Artikelname:	Moorkissen Medi 59 cm x 16 cm
Artikelnummer:	8502
Inhalt:	Ca. 1350 g
Sachbezeichnung:	
Produktgruppe:	Medizinprodukt
Zolltarifnummer:	27030000

Zutaten:	-
Inhaltsstoffe:	-
Zusätzlicher Hinweis (falls vorhanden):	Für Lebensmittel zugelassene Folie, befüllt mit hochwertigem Moor. Hält Wärme und Kälte über sehr lange Zeit.
Warnhinweis:	Kontakt mit heißem Metall oder offenem Feuer führt zur Zerstörung der Folie! Nicht im Backofen erwärmen! Nicht in den Gefrierschrank geben! Erwärmtes Moorkissen nicht direkt auf der Haut verwenden - Verbrennungsgefahr!
Stückgewicht/ Nettofüllgewicht:	1,35 kg
Bruttogewicht:	1,515 kg
Verpackungsmaterial:	Verbundfolie aus Polyamid und Polyethylen, Karton mit Kunststoffdeckel
Verpackungsgröße:	Breite: 126 mm Höhe: 230 mm Tiefe: 126 mm
Besondere Eigenschaften:	-

Erstellt am: 18.09.2024 Erstellt von: E. Huber Freigabe: E. Haslauer	Seite 1 von 2	Geändert von: E. Haslauer Geändert am: 25.08.2025
--	---------------	--

	Moorkissen Produktspezifikation	Nr. 01_02_03_01 Version: 04
---	--	--

Alkoholgehalt:	-
Allergene:	-

Sensorische Beschreibung	
Aussehen/Farbe:	Braunes, pastöses Moor in einer Folie
Geschmack:	-
Geruch:	-
Konsistenz:	-

Lagerung und Haltbarkeit	
Optimale Lagerungsbedingungen/ Lagerungshinweis:	-
Mindesthaltbarkeit:	-

Herstellung und Anwendung	
Anwendung	Erwärmen im Wasserbad (empfohlen): Wasser in einem geeigneten Topf zum Kochen bringen, Topf von der Kochstelle nehmen, Kochlöffel durch die Lasche am Moorkissen schieben und das Moorkissen in das heiße Wasser legen. Ca. 10-15 Min. ziehen lassen. Erwärmen im Dampfgarer: ca. 5 Min. bei 100°C. Erwärmen in der Mikrowelle: ca. 2 Min. bei 600 Watt. Achtung: das Erwärmen in der Mikrowelle kann die Lebensdauer ihres Moorkissens verkürzen. Zum Kühlen: Kissen ca. 1-2 Stunden in den Kühlschrank legen. (Nicht in den Gefrierschrank geben!) Warmes oder kühles Moorkissen auf den zu behandelnden Körperbereich auflegen. Bei Warmanwendung das Kissen in ein Tuch wickeln oder in den Komfortgurt von SonnenMoor einlegen.

Erstellt am: 18.09.2024 Erstellt von: E. Huber Freigabe: E. Haslauer	Seite 2 von 2	Geändert von: E. Haslauer Geändert am: 25.08.2025
--	---------------	--