

Windeleinlage

Bourett Seide

16 cm x 12 cm

Anwendung

Auch bei hautfreundlichen Wickelsystemen kann es vorkommen, daß ihr Baby wund wird, z.B. durch Nahrungsumstellung. Legen Sie die Bourett-Seideneinlage in die Windel.



Die Windeleinlage legen Sie direkt ohne Creme auf die Haut des Babys.

Hier entwickelt die Seide ihre natürlich lindernde Wirkung.



Einlage mindestens alle 3 Stunden wechseln bis die Entzündung abgeklungen ist.

Fönen Sie vorsichtig den wunden Po und lassen ihr Baby auch mal ohne Windeln liegen, damit vermehrt Luft an die Haut kommt.

Pflege

30 ° C Handwäsche mit einem Wollshampoo. Nicht schleudern.



Made in Germany

M E D E S I G N
Dietramszell · Dubai · München

MED1001099

LOT 679342

PRN 21134 SP 00762.000



4