

Plaquerkennung



Mira-2-Ton
Patentierter Zweifarbreaktion zum Erkennen von älterer (blau) und neuerer (rosa) Plaque



Sollbruchstelle
Tablette für zwei Anwendungen geeignet

>> Mira-2-Ton®

Plaquetest-Tabletten für bis zu zwölf Anwendungen

Der miradent-Plaquetest hat sich seit Jahren in der Zahnarztpraxis bewährt. Die Tabletten färben Zahnbeläge eindrucksvoll ein. Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt.

Für den Plaquetest eine Tablette (bei Kindern ggf. eine halbe) auf die Zunge legen, zerbeißen und mit etwas Speichel im Mundraum verteilen, ausspucken - fertig! Die Einfärbungen lassen sich durch einfaches Zähneputzen problemlos entfernen.

Plaquetest-Tabletten sind erythrosinfrei.

>> Plaque Check

Plaquetest-Tabletten mit Mundspiegel

Der miradent Mundspiegel mit dem Fingerform-Griff ist abgewinkelt, besonders flach und zeigt so jedes Detail im Mundraum. Ideal zur Kontrolle der

Ausführung	REF	PZN D	PZN A
Mira-2-Ton, 6er	630 027	2172082	2866442
Mira-2-Ton Lösung, 10 ml	605 659	4203651	3057408
Plaque Check, blau transp.	630 044	2750395	2911510
Plaque Check, pink transp.	630 045	2750403	2911527



Zerbeißen



Reaktion



Überprüfung

Plaqueeinfärbungen. Der kristallklare Spiegel ist durch eine Folie geschützt, die vor dem Einsatz zu entfernen ist.

