

Proxid 1

PZN: 4873386

Anwendung:

1. Hände gründlich waschen
2. Jede Kontaktlinse in die entsprechende Kammer legen ,rechts und links beachten.
3. den Behälter mit der Lösung bis zur angegebenen Höhe füllen und die Linsen in den Behälter legen.
4. die Lösung mindestens 20 Minuten einwirken lassen.
5. Kontaktlinsen vor dem Einsetzen mindestens 10 Minuten lang mit einer neutralisierenden Lösung neutralisieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Produkt darf nicht in direkten Kontakt mit dem Auge kommen.
Es muss vorher mit der neutralisierenden Lösung neutralisiert werden.

Falls die Lösung mit dem Auge in Kontakt kommt, nehmen Sie die Linse sofort raus und spülen Sie das Auge sofort mit Wasser oder einer Kochsalzlösung aus.
Das Produkt vor Wärme und Licht schützen.

Achten Sie darauf, dass der Behälter stets gut verschlossen ist und vermeiden Sie den Kontakt der Tropfvorrichtung mit einer anderen Oberfläche.

Verwenden Sie das Produkt bei anhaltender Irritation nicht weiter, nehmen Sie die Kontaktlinse heraus und wenden sich an einen Optiker.

Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn Sie gegen einer der Inhaltsstoffe allergisch sind.

Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Produkts , ob der Verschluss intakt ist.
Sobald die Lösung angebrochen ist, sollte diese innerhalb von 60 Tagen verbraucht werden.

Bewahren Sie die Lösung außer Reichweite von Kindern auf.

Zusammensetzung:

Desinfektionslösung- Wasserstoffperoxid 3,0%, Natriumphosphat und Dinatriumedetat in gereinigtem Wasser.

Vertrieb in Deutschland:

Osmed UG

Frankfurter Str.51

58095 Hagen

Tel:02331/788290

Fax:02331/ 7882929

e-Mail: info@osmed.de

web: www.Osmed.de

