

Cutimed® PROTECT Creme

Medizinischer Hautschutz zur großflächigen Behandlung gefährdeter Hautareale

Produkt

Insbesondere bei inkontinenten Patienten besteht das Risiko von Mazerationen und Hautreizungen. Die Haut benötigt daher einen zuverlässigen medizinischen Hautschutz, sowie eine feuchtigkeitsspendende Pflege. Cutimed® PROTECT Creme bildet einen Film, der die Haut vor Körperflüssigkeiten schützt und somit das Mazerationsrisiko vermindert.

Durch den Erhalt der natürlichen Barrierefunktion der Haut schützt Cutimed® PROTECT Creme sowohl intakte als auch bereits gereizte Haut vor Schädigungen, die durch Körperflüssigkeiten hervorgerufen werden können. Cutimed® PROTECT Creme spendet darüber hinaus der Haut Feuchtigkeit und ist dabei luft- und wasserdampfdurchlässig. Großflächig angewendet wirkt Cutimed® PROTECT Creme prophylaktisch gegen Mazerationen und Hautreizungen, die insbesondere bei inkontinenten Patienten auftreten können. Cutimed® PROTECT Creme ist nicht nur sicher und einfach in der Handhabung, sondern zieht zudem schnell ein, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Darüber hinaus ist Cutimed® PROTECT Creme frei von Duftstoffen. Das Produkt ist zur Anwendung bei Kindern ab der 4. Lebenswoche geeignet.

Produktzusammensetzung: siehe Cutimed® PROTECT Inhaltsübersicht (INCI-Liste, S. 96)

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Lieferformen

Best.-Nr.	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Cutimed® PROTECT Creme			
7265200	28 g	1/12	6147827
7265203	90 g	12/48	5749122

Hilfsmittelnummer: 29.26.10.3022



Anwendungsgebiete

- Schutz vor Mazerationen und Hautreizungen durch Harn- und/oder Stuhlinkontinenz
- Schutz vor Windeldermatitis

Anwendungsdauer: das betreffende Hautareal kann je nach Bedarf mehrmals eingecremt werden



Cutimed® PROTECT Creme zur großflächigen Anwendung auf stark beanspruchter Haut.



Cutimed® PROTECT Spray und Applikator

Zuverlässiger Hautschutz

Produkt

Insbesondere bei der Versorgung chronischer Wunden stellt der medizinische Hautschutz eine wichtige Begleitmaßnahme dar, da das Risiko von Mazerationen und Hautreizungen besonders hoch ist. Das Cutimed® PROTECT Spray und der Cutimed® PROTECT Applikator wurden speziell für die stark beanspruchten Wundränder und die Wundumgebungshaut von chronischen Wunden entwickelt. Cutimed® PROTECT Spray und Applikator schützen diese effektiv vor äußeren Einflüssen, wie z.B. Wundexsudat, Inkontinenz oder Scherkräften. Der Cutimed® PROTECT Film legt sich wie ein Schutzschild auf die Haut und bietet somit eine zuverlässige Barrierefunktion, die zudem wasserdampf- und sauerstoffdurchlässig ist. Cutimed® PROTECT Spray und Applikator können prophylaktisch auf intakten oder bereits irritierten Hautarealen angewendet werden und schützen diese bis zu 96 Stunden vor Mazerationen durch Körperflüssigkeiten.

Darüber hinaus sind Cutimed® PROTECT Spray und Applikator frei von Alkohol und Duftstoffen und so besonders hautschonend. Beide Produkte sind daher auch zur Anwendung bei Kindern ab der 4. Lebenswoche geeignet.



Cutimed® PROTECT Spray und Applikator sind ein effektiv ergänzender Hautschutz während der Behandlung von chronischen Wunden.

Produktzusammensetzung: siehe Cutimed® PROTECT Inhaltsübersicht (INCI-Liste, S. 96)

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

Anwendungsgebiete

- Primärschutz gegen Hautreizungen durch Körperflüssigkeiten
- Schutzschild gegen Kleb- und Reizstoffe
- Schutz der Wundumgebungshaut und des Wundrandes vor Mazerationen

Anwendungsdauer: abhängig von der Indikation (z.B. Reinigung)



Cutimed® PROTECT Applikator: Für eine gezielte Anwendung auf Wundrändern und Wundumgebung

Lieferformen

Best.-Nr.	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Cutimed® PROTECT Spray			
7265300	28 ml	1/12	5749033
7265301	28 ml	12/48	5749056
Hilfsmittelnummer: 29.26.10.2020			
Cutimed® PROTECT Applikator			
7265400	1 ml	5/120	5749062
7265401	1 ml	25/150	5749079
7265402	3 ml	5/100	5749085
7265403	3 ml	25/100	5749091

Hilfsmittelnummer: 29.26.10.2019



Cutimed® PROTECT Inhaltsstoffe und deren Deklaration (Stoffgruppe)

Inhaltsstoffe (Ingredients acc. INCI)

Cutimed® PROTECT Spray und Applikator

Polymerlösung aus Disiloxan und Acrylat- Copolymer.

Cutimed® PROTECT Creme

Gereinigtes Wasser, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA

Inhaltsstoffe

Stoffgruppe

Acrylat-Copolymer	Filmbildner
Allantoin	hautschützend
Butylene Glycol	Konservierungsmittel, Feuchthaltemittel
Carbomer	Verdickungsmittel
Disiloxan	Lösungsmittel
Disodium EDTA	Feuchthaltemittel
Ethylhexyl Isononanoate	Lösungsmittel, Feuchthaltemittel
Gereinigtes Wasser	Feuchthaltemittel, Lösungsmittel
Hydrogenated Styrene/ Isoprene Copolymer	Filmbildner
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer	Emulgator
Methylparaben	Konservierungsmittel
Oleth-3 Phosphate	Emulgator
Phenoxyethanol	Konservierungsmittel
Polyisobutylene	Filmbildner
Propylparabenr	Konservierungsmittel
VP Eicosene Copolymer	Filmbildner
Triethanolamine	pH-Stabilisator