


GEBRAUCHSANWEISUNG		
Produkt: AmmoLa Riechstäbchen		
Version vom 20.03.2024	Seite 1 von 1	
EDV: 2		

Allgemein

Aromatisierter Ammoniak ist ein farbloser, stechend riechender Stoff, der durch das Einatmen der Dämpfe einen starken Reiz in der Nase ausübt.

Trainingshilfe


AmmoLa Riechstäbchen werden im Rahmen des Fertigkeitstrainings (Skilltrainings) eingesetzt, um im privaten und beruflichen Alltag zurecht zu kommen und erfolgreich zu sein.

Anwendung

AmmoLa Ampulle durch Druck aufbrechen. Die Flüssigkeit wird von der Ummantelung aufgenommen.

Ampulle zum Einatmen kurz unter die Nase halten.

Bei der praktischen Anwendung wird durch Riechen an dem **AmmoLa** Riechstäbchen ein starker Reiz ausgelöst, der die Kontrolle dissoziativer Zustände unterstützt.

 Achtung	<ul style="list-style-type: none"> • Reizt Augen, bei längerem Kontakt auch Atemorgane und Haut. Nur äußerlich anwenden. Nicht in die Augen bringen. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe besteht. • Darf nicht nach Ablauf des Verfallsdatums benutzt werden.
---	--

Gebinde

10 Riechampullen aus Glas à 0,4 ml

Inhaltsstoffe

Isopropanol, gereinigtes Wasser, Ammoniak, Lavendelöl

Ausgabe

April 2024



WQS ManagementConsultants GmbH, Waterkamp 24a, D-59075 Hamm

Vertrieb: DEVESA Dr. Reingraber GmbH & Co. KG, D-18311 Ribnitz-Damgarten
Tel. 0 38 21 / 88 90 860

LOT JJJJ X / verwendbar bis MM.JJJJ (5 Jahre)

Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/EWG

PZN -06766849

