

# schülke -†



## antifect® AF (N)

Aldehydfreies Konzentrat auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen zur Desinfektion und Reinigung von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen.

### Unser Plus

- gutes Wirkspektrum (wirksam gegen Noroviren)
- auf Basis von QAV

### Anwendungsgebiete

Das Produkt ist für die Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten geeignet. Als langjährig etabliertes Produkt findet es Anwendung in allen Krankenhausbereichen und ist mit dem schülke s&m Reinigungsadditiv und schülke s&m Pflegeadditiv kombinierbar. Wegen des Gehaltes an kationischen Wirkstoffen kann die Kombination mit Reinigern, Reinigungsadditiven oder Wischpflegeprodukten Auswirkungen auf die mikrobiologische Wirksamkeit haben und anwendungstechnische Probleme verursachen. Daher sollte eine Produktabmischung nur nach vorheriger Absprache mit schülke erfolgen.

### Anwendungshinweise

Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration ansetzen. Oberflächen von Medizinprodukten bzw. Fußböden und anderen wischbaren Flächen, feucht wischen. Auf vollständige Benetzung der Flächen achten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Die Dosierung über zentrale und dezentrale Dosiergeräte ist möglich. Zur Dosierung können schülke Dosierhilfen verwendet werden. Nach Abschluss der Arbeit die Gebrauchslösung entsorgen und die Ausrüstung gründlich mit Wasser reinigen. Eine zusätzliche Pflege des Bodens kann je nach Bodenart sinnvoll sein. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>bakterizid</b> gemäß VAH - hohe Belastung	0,5 % (5 ml/l)	60 Min.
<b>levurozid</b> gemäß VAH - hohe Belastung	0,5 % (5 ml/l)	60 Min.
<b>begrenzt viruzid</b> gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	0,5 % (5 ml/l)	30 Min.
<b>Norovirus</b> EN14476 - geringe Belastung	1 % (10 ml/l)	60 Min.
<b>Norovirus</b> EN14476 - hohe Belastung	2 % (20 ml/l)	120 Min.
<b>Rotavirus</b> gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	0,25 % (2,5 ml/l)	5 Min.
<b>Adenovirus (Typ 5)</b> EN14476 - geringe Belastung	1 % (10 ml/l)	120 Min.
<b>Adenovirus (Typ 5)</b> EN14476 - hohe Belastung	2 % (20 ml/l)	120 Min.

### Listungen

- VAH-Zertifikat
- IHO-Liste



## Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe:

18 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/  
BKC (C12-16)), 1,2 g Polyhexamethylenbiguanid (Monomer:  
1,5-Bis(trimethylen)guanylguanidin-Monohydrochlorid)  
(PHMB)

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:

5 - 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	grün
Flammpunkt	65 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	8,2 - 8,8 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 5 mPa*s / 20 °C / Methode: ISO 3219

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com).

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Weitere Angaben zur sicheren Handhabung und Lagerbedingungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die Haltbarkeit der Anbruchgebände ist der Verpackung zu entnehmen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
antifect® AF (N) 2 l Flasche	5/Karton	180831
antifect® AF (N) 5 l	1/Kanister	180832

## Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810
Messbecher 500 ml	136101
Messbecher 50 ml	136102
Opener all-in-one (1L Euroflasche/Kanister/Fässer)	70000804
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	117101
schülke Kanisterhahn für 5 l / 10 l	135501
Umfülltrichter	117901

## Verwandte Produkte

- s&m Pflegeadditiv
- s&m Reinigungsadditiv
- schülke wipes
- schülke wipes safe&easy



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)