



COMPRESSANA CALYPSO 40

ca. 10 mmHg

Stützklasse

soft

40 den

Transparente Strumpfhosen und Strümpfe mit der Optik von Feinstrümpfen in hochwertigster Verarbeitung. Aufwändige Strick- und Nähetechnik. Mit leichter, angenehmer Stützwirkung. Wohltuend – den ganzen Tag.

- **Strumpfhose mit modisch unverstärktem Höschen**
- **halterlose Strümpfe mit Spitzenband**
- **hauchzarte Transparenz bis in die Fußspitze**
- **seidiger Glanz**



Produkt	Größe	Farbe	
 Strumpfhose „tutto nudo“ transparentes Höschen	I-VI XS-XXL	cafécreme	schwarz
 „Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Spitzen-Haftband, halterlos	II-V S-XL	cafécreme	schwarz
 Kniestrümpfe mit Massage-Fußsohle	II-IV S/M, M/L, XL	cafécreme	schwarz

TIPP
Fußkomfort

Anzieh- und Pflegehinweise

Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Ziehen Sie gegebenenfalls die Fußspitze leicht nach vorne. Sorgfältige Pediküre verlängert die Lebensdauer Ihrer Strümpfe. Ringe und spitze Fingernägel können die feinen Maschen beschädigen. Gleiches gilt auch für defekte Schuhe.

Auch nach vielen Wäschen behalten **CALYPSO-Stützstrümpfe** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

Vor dem Tragen waschen • auf links waschen
• **keine Weichspüler verwenden**

Größenübersicht Calypso 40

Gr.	Konfektion		Schuhgrößen	Gewicht/kg	Figurtyp
I	XS	34–36	36–38	ca. 43–52	schmal – klein
II	S	36–38	37–39	ca. 50–60	schmal – normal
III	M	40–42	39–40	ca. 57–66	normal
IV	L	42–44	40–42	ca. 63–75	normal – groß
V	XL	44–46	41–43	ca. 73–90	kräftig – normal
VI	XXL	48–50/52	41–43	> 80	extra

