



USA 1-800-882-4582
Canada 1-800-494-5134








Mölnlycke Health Care AB (Publ), Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden




www.molnlycke.com

Mesalt

5 x 5 cm • 7.5 x 7.5 cm • 10 x 10 cm

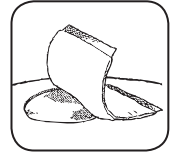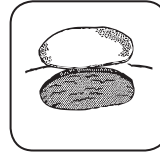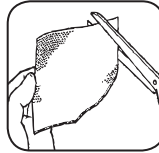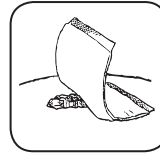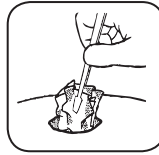

2 x 100 cm

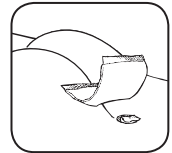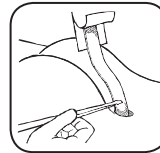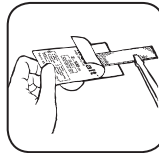

Produktbeschreibung:

Mesalt besteht aus einem weichen Vliesstoff (Viskose/Polyester), welcher mit Kochsalz imprägniert ist. Mesalt unterstützt die Wundreinigung bei sezernierenden, belegten oder infizierten Wunden.

Anwendungsgebiete

Mesalt ist indiziert als Primärverband für mittel bis stark sezernierende, infizierte Wunden, wie beispielsweise Ulcus cruris, Dekubitus, etc.

Bitte beachten

Mesalt sollte nicht bei vorbelasteten Patienten mit allergischen Reaktionen auf die o.g. Inhaltsstoffe angewendet werden. Mesalt sollte nicht bei trockenen oder wenig sezernierenden Wunden eingesetzt werden. Mesalt sollte auch nicht in direkten Kontakt mit Knochen und Sehnen gelangen. Infizierte Wunden sollten vorher begutachtet und in geeigneter Form behandelt werden.

Applikation:

1. Falls erforderlich, reinigen Sie die Wunde und entfernen Sie übermäßiges nekrotisches Gewebe.
2. Trocknen Sie die wundumgebende Haut, jedoch nicht die Wunde.
3. Sofern medizinisch indiziert, schützen Sie die wundumgebende Haut mit einer geeigneten, wasserabweisenden Creme oder Salbe.
4. Wählen Sie eine geeignete Verbandgröße aus, welche- die Wunde komplett abdeckt- tiefe Wunden komplett ausfüllt.
5. Vermeiden Sie, dass Mesalt die wundumgebende Haut bedeckt.
6. Abhängig von der Exsudation sollte ein geeigneter, saugfähiger Sekundärverband verwendet werden.
7. Sofern medizinisch indiziert, kann Mesalt während einer Kompressions-therapie angewendet werden.

Verbandwechsel

Mesalt sollte abhängig vom Wundzustand oder nach Erreichen seiner Aufnahmekapazität gewechselt werden (bei stark exsudierenden Wunden ca. 1 mal täglich) oder der erforderlichen medizinischen Versorgung. Sollte eine Verschlechterung der Wundsituation oder sonstige Reaktionen eintreten, so ist Mesalt nicht mehr anzuwenden und medizinisches Fachpersonal zu befragen.

Sterilität wird garantiert, sofern die Sterilverpackung nicht beschädigt ist bzw. geöffnet wurde.
Nicht resterilisieren.

