

# Eclipse Adherent Sacral™

Super absorbent sacral dressing  
with silicone contact layer

Instructions for use

**Advancis**  
Medical

## Eclipse Adherent Sacral™

Supersaugfähige Sakralwundauflage mit Silikonkontaktschicht

DEU

### Produktbeschreibung

Mehrschichtige Sakralwundauflage, die sich zusammensetzt aus Silfix® Weichsilikon, das nur an gesunder Haut klebt, einem Stoff für schnelle Flüssigkeitsabsorption, einem supersaugfähigen Zentrum aus XU-Lock™ für hervorragende Flüssigkeitsaufnahme und einer atmungsaktiven Schutzschicht aus Polyethylen. Eclipse Adherent Sacral ist sehr aufnahmefähig und wandelt Flüssigkeiten in einzigartiger Weise in ein feuchtes Gel um, wodurch sowohl das Aufweichen als auch Durchrinnen verhindert wird.

### Indikation

Für alle nässenden Wunden im Sakralbereich, wie z.B. Druckgeschwüre.

### Gegenanzeigen



Arterienblutungen und stark blutende Wunden.

### Gebrauchsanleitung

Mit der weißen Silikonsschicht nach unten auf die Wunde auflegen, wobei rundum ein Rand von mindestens 2cm über die Wunde überstehen muss. Eclipse Adherent Sacral nicht zuschneiden. Eclipse ist selbstklebend, kann aber zusätzlich mit einem geeigneten Pflaster fixiert werden müssen. Eclipse Adherent Sacral muss gewechselt werden, bevor die Auflage vollständig vollgesogen ist, kann aber je nach Exsudatmenge bis zu 7 Tage verbleiben.

### Entsorgung

Als klinischer Abfall zu entsorgen.

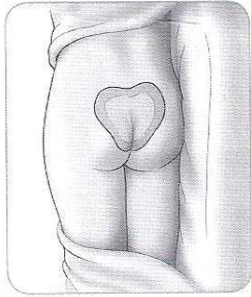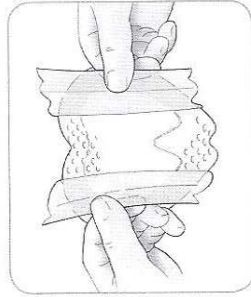

STERILE/EO



CE  
0086