



COMPRESSANA CALYPSO 70

ca. 12 – 14 mmHg
Stützklasse II medium
70 den

Die unwiderstehliche Synthese aus Wirkung und modischem Chic. Luftig und transparent wie Feinstrümpfe, bietet CALYPSO 70 höchsten Tragekomfort und beste Verarbeitung. Das vielfältige und umfassende Sortiment lässt bestimmt keine Wünsche offen.

- **passgenaue anatomische Form**
- **weich, hautsympathisch und transparent (appearance 20 den)**
- **unsichtbar eingestrickte Ferse und Spitze**



Produkt	Größe	Farbe						
Strumpfhose mit Komfort-Hosenteil	I-VI XS-XXL	sandel	silk	sepia	perle	romance	nachtblau	schwarz
Strumpfhose extraweit / Umstands-Strumpfhose	II-VI S-XXL		silk	TIPP für Schwangere		romance	nachtblau	schwarz
„Stay-up“ Schenkelstrümpfe mit Spitzen-Haftband, halterlos	I-V XS-XL	sandel	silk	sepia	perle	romance	nachtblau	schwarz
Schenkelstrümpfe zur Strapsbefestigung	I-V XS-XL		silk		perle	romance		
Kniestrümpfe mit Softbündchen*	I-VI XS-XXL	sandel	silk	sepia	perle	romance	nachtblau	schwarz

Anzieh- und Pflegehinweise

Achten Sie beim Anziehen darauf, dass die Zehen nicht eingengt sind. Ziehen Sie gegebenenfalls die Fußspitze leicht nach vorne. Sorgfältige Pediküre verlängert die Lebensdauer Ihrer Strümpfe. Ringe und spitze Fingernägel können die feinen Maschen beschädigen. Gleiches gilt auch für defekte Schuhe.

Auch nach vielen Wäschen behalten **CALYPSO-Stützstrümpfe** ihr gutes Aussehen und ihre Wirkungskraft:

- **Handwäsche** mit COMPRESSANA CLEAN Feinwaschmittel in handwarmen Wasser. Gut ausspülen, nicht wringen!
- **Maschinenwäsche** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung des COMPRESSANA Wäschenetzes.
- **Trocknen:** im Handtuch rollen oder auf eine Leine hängen. Nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen! Nicht in den Trockner!

Vor dem Tragen waschen • auf links waschen
• keine Weichspüler verwenden

Größenübersicht Calypso 70

Gr.	Konfektion		Schuhgrößen	Gewicht/kg	Figurtyp
I	XS	34–36	36–38	ca. 43–52	schmal – klein
II	S	36–38	37–39	ca. 50–60	schmal – normal
III	M	40–42	39–40	ca. 57–66	normal
IV	L	42–44	40–42	ca. 63–75	normal – groß
V	XL	44–46	41–43	ca. 73–90	kräftig – normal
VI	XXL	48–50/52	41–43	> 80	extra

