

Dr. Denti Softgrip Prothesenhaftmittel

PZN 09116201 | Art. 2203

- Bequemes, weiches Acrylharz für problematische Zahnprothesen
- Gebrauchsfertig, kein Mischen erforderlich
- Polsterung schmerzhafter neuer Prothesen
- Stabilisierung loser Prothesen
- Wiederversiegelung nach Zahnfleischschwund
- Füllen lokaler Hohlräume in Prothesen



Dr. Denti Softgrip Prothesenhaftmittel ist die ideale Lösung für problematische Zahnprothesen. Dieses weiche Acrylharzmaterial wurde speziell entwickelt, um als Fixativ und Unterlage für Prothesen zu dienen. Es ist gebrauchsfertig und erfordert kein Mischen. Soft-Grip polstert schmerzhaft neue Prothesen, stabilisiert lockere Prothesen und versiegelt Prothesen nach Zahnfleischschwund erneut. Darüber hinaus füllt es lokale Hohlräume in Prothesen.

Gebrauchsanweisung:

1. Waschen und trocknen Sie die Prothese gründlich, entfernen Sie alle zuvor aufgetragenen Fixative und Liner.
2. Erwärmen Sie die Soft-Grip-Spritze, indem Sie sie 2 Minuten lang in sehr heißes Wasser eintauchen.
3. Drücken Sie vorsichtig einen gleichmäßigen Harzstrahl auf die Passfläche der Prothese.
4. Verteilen Sie das Soft-Grip-Kunststoff mit nassen Fingern auf der Prothese.
5. Setzen Sie die Prothese in den Mund ein, beißen Sie zusammen, bewegen Sie die Kiefer 5 Mal von einer Seite zur anderen und pressen Sie dann die Zähne weitere 2 Minuten lang sanft zusammen.
6. Entfernen Sie die Prothese aus dem Mund und wischen Sie überschüssiges Harz mit nassen Fingern ab.
7. Spülen Sie den Mund aus, bevor Sie die Prothese wieder einsetzen.

Weitere Hinweise:

- Tragen Sie die Prothese kontinuierlich für mindestens 8 Wochen.
- In den ersten 3 Stunden nichts essen.
- Soft-Grip kann nach 5-6 Wochen entfernt und ggf. neu aufgetragen werden.
- Bei anhaltenden Prothesenproblemen wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Dr. Denti

Produktinformationen

Abmessungen: 120,00 x 90,00 x 25,00 cm
Artikelgewicht: 0,000 kg
Gewicht mit Verpackung 0,02 kg
Inhalt/Menge: 1 St
UVP: 14,90 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39 info@megadent.de
40211 Düsseldorf Tel +49 211 17754 0
www.megadent.de Fax +49 211 17754 20