

Prothesenbox Ecosym oval mit Sieb 3tlg

PZN 09508792 | Art. 2259

Die Ecosym Gebiss Reinigungsbox in Kombination mit dem Ecosym Reinigungskonzentrat Weekly erlauben eine ausgezeichnete Reinigung für Zahn-, Total- oder Teilprothese.



Die Ecosym Gebiss Reinigungsbox in Kombination mit dem Ecosym Reinigungskonzentrat Weekly erlauben eine ausgezeichnete Reinigung für Zahn-, Total- oder Teilprothese.

Anwendung:

1. Gießen Sie 3 bis 4 Kappen Ecosym Reinigungskonzentrat Weekly in die Ecosym Reinigungsbox.
2. Nehmen Sie Ihre Prothese aus dem Mund und legen Sie sie auf das Gitter der Prothesenbox.
3. Füllen Sie die Prothesenbox mit lauwarmem Wasser, bis die Prothese vollständig untergetaucht ist.
4. Lassen Sie die Prothese 8 Stunden lang einweichen.
5. Nehmen Sie das Gitter aus der Prothesenbox und spülen Sie Ihre Prothese gut mit lauwarmem Wasser ab.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Ecosym, 3-teilig, Banderole

Produktinformationen

Abmessungen: 7,90 x 11,70 x 7,90 cm
Artikelgewicht: 0,095 kg
Gewicht mit Verpackung 0,10 kg
Inhalt/Menge: 1 St
UVP: 5,29 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20

