



## GEBRAUCHSANWEISUNG

**ANWENDUNGSGEBIETE:** Herausnehmbarer Zahnersatz gefertigt aus Edelmetall (Gold-Silber-Platinlegierungen) mit Keramikverblendungen, Nichtedelmetall (Kobalt-Chrom-Molybdän) mit Kunststoff oder Keramikverblendungen; Knirscher-, Schnarcherschienen, Interimsprothesen bei Implantatversorgungen, Sportmundschutz aus Kunststoffen, kieferorthopädische Schienen oder Regulierungsapparate für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Für Hochleistungspolymere PEEK und AKP bestens geeignet.

**INHALTSSTOFFE UND ZUSAMMENSETZUNG:** 2 bis 5% Phosphorsäuremonomethylester (812-00-0), organische Lösungsmittel, 0,5 bis 2% Phosphorsäure (7664-38-2), Tenside und Hilfsstoffe.

**ANWENDUNG:** Verdünnung 1:20 entspricht z.B. 10 ml Konzentrat welches mit Wasser auf 200 ml verdünnt wird. Anwendungsdauer im Ultraschallbad ca. 3-5 Minuten und kann je nach Bedarf wiederholt werden. Vor- und/oder Nachreinigung kann mit einer weichen Zahnbürste durchgeführt werden. Nach dem Reinigen die Teile unter fließendem Wasser gründlich abspülen und mit einem weichen, staubfreien Tuch trocken tupfen. Maximal 3 Arbeitstage bzw. bis zu sichtbarem Bodensatz oder Eintrübung anwendbar.

**GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE:** GEFAHR. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. MyDental-Cleaner darf nicht mit Basen oder anderen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln gemischt werden.

**UFI: HPP9-NOX9-KOOX-CVUO**

**LAGERUNG:** Dicht verschlossen im Originalgebinde lagern. Das Produkt ist nicht entzündlich.

**WICHTIGE HINWEISE:** Das Produkt erhalten Sie von Ihrem Dentallabor oder Ihrer Zahnarztpraxis. Die regelmäßige Anwendung zuhause reinigt und pflegt Ihren Zahnersatz, Knirscher-, Schnarcherschienen, Sportmundschutz, Interimsprothesen und kieferorthopädische Apparate zur Zahnregulierung für ein angenehmes Mundgefühl und frischen Atem. Einmal im Quartal sollten Zahnersatz, Schienen, Sportmundschutz oder die kieferorthopädischen Apparate von Ihrer Zahnarztpraxis oder Ihrem Dentallabor professionell gereinigt und geprüft werden, um den Wert zu erhalten und die Passung zu überprüfen.

**VORKOMMISSEMELDUNG:** Mit dem Produkt zusammenhängende schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

**ENTSORGUNGSHINWEISE:** Produktreste sind als gefährlicher Abfall – möglichst im Originalbehälter – zu entsorgen. Nicht über das Abwasser entsorgen und nicht mit anderen Abfällen mischen. Mit Produkt verunreinigte Verpackungen gelten als gefährliche Abfälle und sind ebenfalls entsprechend zu entsorgen. Verunreinigte Verpackungen sind optimal zu entleeren und können dann nach entsprechender Reinigung (Ausspülen mit Wasser) einer Wiederverwertung zugeführt werden.


# MyDentalCleaner

Reinigungs- und Pflegekonzentrat zur Anwendung in Ultraschallreinigern

Für herausnehmbaren Zahnersatz, kieferorthopädische Regulierungsapparate, Sportmundschutz, Interimsprothesen, Schnarcher- und Knirscherschienen.



**MD** PZN 9629188 MyDentalCleaner 300 ml  
PZN 12599870 MyDentalCleaner 50 ml

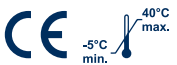

**ALPRO MEDICAL GMBH**  
Mooswiesenstr. 9 · 78112 St. Georgen · Germany  
T +49 7725 9392-0 · www.alpro-medical.com

**MyDental** GmbH

Rotehausstr. 36 · 58642 Iserlohn  
T +49 2374 508 38 18  
E-Mail: info@mydental.de · www.mydental.de