

OP-Mundschutz blau mit Gummibändern 50 Stück

PZN 11266735 | Art. 7026

3-lagig mit Gummibändern - 50 Stück, blau
Typ II R, EN 14683:2019+AC:2019

- Filtereffizienz in Höhe von >98%
- Latexfrei
- Nasenbügel für bequemen Tragekomfort
- Glasfaserfreies Filtermedium



Anwendungshinweise

1. Halten Sie die Maske an den Ohrschlaufen.

Der Nasenbügel zeigt nach oben und die farbige Seite des Mundschutzes vom Gesicht weg.

Platzieren Sie die Ohrschlaufen hinter den Ohren.

2. Biegen Sie den Drahtbügel so, dass er sich optimal an Ihre Gesichtsform anpasst, um das Austreten von Luft in diesem Bereich zu verhindern.

3. Ziehen Sie die Maske über Ihr Kinn, um Mund und Nase zu bedecken.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe
Blau, Megadent, Karton

Produktinformationen

Abmessungen: 19,00 x 10,00 x 8,00 cm

Artikelgewicht: 0,188 kg

Gewicht mit Verpackung 0,19 kg

Inhalt/Menge: 50 St

UVP: 2,99 € inkl. MwSt



Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20