

SUPRASORB G GELKOMP 5X6.5

SUPRASORB G Gelkompressse 5x6,5 cm

PZN: 11267835

Inhalt: 5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Die SUPRASORB® G Gel-Kompressse sorgt an der Oberfläche der Wunde für ein feuchtes Wundmilieu. Das Gel ist für Wasserdampf und Gase durchlässig. Indikationen: Die SUPRASORB® G Gel-Kompressse kann als Wundkontaktschicht angewendet werden hat eine kühlende und lindernde Wirkung und sorgt für Aufnahme und Retention von Exsudat. Hauptsächlich zur Anwendung bei Verbrennungen Verbrühungen Schäden durch Strahlentherapie epidermalen Schäden und Beingeschwüren. Zur Behandlung von nozizeptiven Wundschmerzen zur Unterstützung des autolytischen Debridements durch Hydratation von nekrotischem und schmierigem Gewebe. Sie ist für die Anwendung auf schmerzenden Wunden geeignet. Gegebenenfalls ist auch eine Anwendung zusammen mit Sekundärverbänden möglich. Die SUPRASORB® G Gel-Kompressse kann unter Kompressionsverbänden auf mäßig bis stark exsudierenden Wunden angewendet werden. Die SUPRASORB® G Gel-Kompressse ist angezeigt bei oberflächlichen Verbrennungen und Verbrennungen der mittleren Hautschicht d.h. bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Kontraindikationen: Die SUPRASORB® G Gel-Kompressse darf nicht angewendet werden: bei stark blutenden Wunden bei Verbrennungen dritten Grades zur Abdeckung von tiefen schmalen Wundhöhlen oder Fistelgängen bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile der Gel-Kompressse

Zusammensetzung

Die Suprasorb® G-Gel-Kompressse besteht aus: Trägerfolie: Polyethylen transparent. Hydrogel-Schicht: Polyethylenmatrix blau Wasser Acrylpolymer auf Basis eines Tauratderivats Phenoxyethanol. Abdeckfolie: Polyethylen weiß.