

Flocare® Flaschen/Pack Schwerkraft-Überleitgerät

Das Flocare® Flaschen/Pack Schwerkraft Überleitgerät kann mit dem ENPlus Anstechdorn für alle vorgefüllten Sondennahrungsbeutel und Flocare® Container, verwendet werden. Das Flocare® Flaschen/Pack Schwerkraft Überleitgerät kann mit dem Flaschenadapter an Weithals-, Kronkorken- und Babyflaschen angeschlossen werden. Es besteht die Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungs sonden durch den ENFit-Konnektor. Inkompatibel mit Luer- und ENLock Sonden.

Produktmerkmale

- mit ENPlus Anstechdorn für alle vorgefüllten Sondennahrungsbeutel und Flocare® Container
- Anschlussmöglichkeit mit dem Flaschenadapter an Weithals-, Kronkorken-, Babyflaschen und Container
- mit klarer Tropfkammer und Präzisionsrollenklemme
- inkl. separater Halterung für Flaschen mit 500 ml Inhalt
- Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungs sonden mit ENFit Konnektor -> inkompatibel mit Luer und ENLock Sonden
- Zuspritzschenkel zur Verabreichung von Medikamenten, geeignet für ENFit Spritzen -> inkompatibel mit Luer-Spritzen oder enteralen Dispensern



Verordnungsfähigkeit

erstattungsfähig

Anwendungshinweise

Überleitgeräte bis zu 24 h verwendbar. Einsatz von Schwerkraftapplikation im Allgemeinen bei gastral er Sondenlage, bei stabilen Patienten/Heimbewohnern mit normaler Magenentleerung und normalen Schutzreflexen sowie ohne Aspirationsgefährdung. Bei Kindern sollte als Alternative zur Ernährungspumpe eine Applikation mit einer Blasenspritze erfolgen, nicht mit Schwerkraft. Durch großes Innenlumen ideal geeignet für die Schwerkraftapplikation von hochkalorischen, ballaststoffreichen Sondennahrungen.

Flocare® Flaschen/Pack Schwerkraft-Überleitgerät

Bestellinformationen

Artikelname	EAN/GTIN	PZN	SKU/SAP Nummer	VPE
Flocare® Flaschen/Pack Schwerkraft-Überleitgerät	8716900564215	11289311	89755	30 St.