

APHTHEN & kleine Wunden der Mundschleimhaut



Gebrauchsfertiges Flüssigpflaster zur Behandlung von Aphthen (1 bis 2 Aphthen <1 cm pro Erkrankung) sowie von kleinen Wunden der Mundschleimhaut.

• Gebrauchsanweisung:

Eine Spatelseite am Rand des Flakons abstreifen. Das verbleibende Gel mit der Spatelspitze auf die Wunde auftragen, so dass die zu behandelnde Fläche gut bedeckt wird. Zehn Sekunden antrocknen lassen, danach den Mund schließen: ein sichtbarer Film bildet sich.

Falls die Wunde nicht vollständig bedeckt ist, den Vorgang wiederholen.

Bis zur vollständigen Abheilung (über 3 bis 5 Tage) drei- bis viermal täglich auftragen, vorzugsweise vor den Hauptmahlzeiten und ohne den Film der vorherigen Anwendung zu entfernen. Die Zusammensetzung des Produktes erspart die Reinigung des Spatels nach dessen Gebrauch.

• Zusammensetzung:

Cellulosederivat, Mineralsäure, Carboxylsäuren, Alkohol, Wasser, Aroma, Sucralose.

• Gegenanzeigen:

Nicht auftragen auf größere Aphthen (Durchmesser > 1 cm) oder auf herpesähnlichen Aphthen (Aphthen sehr kleiner Größe in sehr großer Anzahl), die eine Rücksprache mit dem Arzt erfordern.

Nicht auf infizierte Wunden, Verbrennungen, tiefe (blutende) Wunden auftragen. Bei Allergie gegen Salicylsäurederivate nicht anwenden. Halten Sie in diesen Fällen Rücksprache mit Ihrem Arzt. Die Anwendung des Produkts ist in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern kontraindiziert. Das Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.

• Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung:

Flakon nach der Anwendung gut verschließen. Nach Anbruch 6 Monate verwendbar. Ausschließlich auf die Mundschleimhaut auftragen. Kann beim Auftragen brennen. Nicht auf die Außenseiten der Lippen auftragen. Den gebildeten Film nicht mechanisch entfernen, er löst sich von selbst. Wenn innerhalb von 5 Tagen nach Behandlungsbeginn keine Besserung eintritt, sollten Sie die Behandlung abbrechen und einen Arzt aufsuchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Den Inhalt des Flakons nicht trinken. Während der Anwendung, vor dem vollständigen Trocknen des Produktes oder in der Nähe des offenen Fläschchen nicht rauchen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Das Produkt kann auch bei Mundwunden, die durch das Tragen von Zahnprothesen oder Zahnspangen hervorgerufen werden, verwendet werden, sofern der Film nicht durch diese bedeckt wird. Im Falle von schwerwiegenden Ereignissen oder einer Gesundheitsgefährdung wenden Sie sich bitte an: kontaktindeutschland@urgo.de

Für alle anderen Fragen oder Rückmeldungen wenden Sie sich bitte an: contact@urgo.fr

• Aufbewahrung:

Nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Von Flammen oder Zündquellen fernhalten. Bei Raumtemperatur unter 25°C aufbewahren. Medizinprodukt. CE-Kennzeichnung angebracht: 2017 - Letzte Prüfung der Packungsbeilage: 10-2019

• Was ist eine Aphthe?

Eine schmerzhaft, von einem entzündlichen Randsaum umgebene oberflächliche Schädigung der Mundschleimhaut mit weißlichem Fibrinbelag. Die Ursachen sind weitgehend unklar, einige Faktoren können ihr Auftreten jedoch fördern: Vererbung, bestimmte Nahrungsmittel, physisches Trauma (Biss auf die Mundschleimhaut, Zahnprothese), bestimmte Medikamente, Stress oder Hormone.

• Wie wirkt URGO Aphthen?

Nach dem Auftragen bildet sich ein sichtbarer, dünner und flexibler Schutzfilm, der:

- die Wunde bis zu 4 Stunden lang vor Nahrungsmitteln und Speichel schützt
- den Schmerz rasch und langanhaltend lindert
- wundheilungsfördernd ist

 Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - Frankreich

 Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - Frankreich



Leicht entzündlich