



Optimiertes Design -  
zur schnellen und komfortablen  
Unterpolsterung!

## Hinweise zu Ihrer Kompressionsmanschette

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl unserer **Kompressionsmanschette**! Damit Sie und Ihre Patienten möglichst zufrieden mit dem Produkt sind, finden Sie hier einige Hinweise zur Anwendung und Pflege.

**Haben Sie Fragen?** Wir stehen Ihnen unter +49 (0) 5224 999 2490 oder per Email unter [info@sanaFactor.com](mailto:info@sanaFactor.com) gerne zur Verfügung!

CAROLON

sanaFactor



Die sanaFactor Kompressionsmanschetten können in Kombination mit anderen Kompressions-systemen als zusätzliche Unterpolsterung eingesetzt werden oder die erste Lage des Systems ersetzen. Dabei wirkt die sanfte Kompression dieses Produktes von ca. 5 mmHg zusätzlich zu dem Kompressionsdruck eines kombinierten Kompressionssystems.

Sie sind leicht und schnell anzuziehen und bieten eine passende Unterpolsterung zur Haut. Während es bei den üblichen Polsterbinden zu Abdrücken entlang der Umwicklung kommt, bieten die sanaFactor Kompressionsmanschetten eine passende Unterpolsterung, die weich und glatt am Bein verbleibt. Dadurch wird das Bein vor Abdrücken und Einschnürungen geschützt. Die Kompressionsmanschetten sind hautfreundlich und atmungsaktiv. Durch die enthaltenen Kupferfasern wirken die Kompressionsmanschetten dem Geruch, der durch die Bakterien im Schweiß entsteht, wirksam entgegen.

Die Kompressionsmanschetten können auch einzeln eingesetzt werden und erzeugen einen sanften Druck von ca. 5 mmHg. Bitte beachten Sie bei der Einzelanwendung, dass die Manschetten mit ihrem besonders weichen Gestrick für die Unterpolsterung von kombinierten Kompressionssystemen entwickelt und optimiert wurden und dass es bei der Einzelanwendung zu einem vorzeitigen Verschleiß dieses Gestricks durch die Reibung der darüber liegenden Kleidungsstücke kommen kann.

#### Anwendung:

Messen Sie den Knöchel- und den Wadenumfang des Beins, um die Größe der Kompressionsmanschetten auszuwählen. Zur Sicherstellung des korrekten Drucks und einer anatomisch korrekten Passform ist es wichtig, dass Sie die richtige Größe für das betroffene Bein entsprechend folgender Tabelle auswählen:

Größe	Knöchelumfang	Wadenumfang	PZN
Klein (S)	19 - 25 cm	30 - 40 cm	14258469
Mittel (M)	23 - 30 cm	35 - 48 cm	14258475
Groß (L)	28 - 38 cm	43 - 61 cm	14258481
Extragroß (XL)	30 - 42 cm	40 - 66 cm	14258498

Bitte verwenden Sie die Kompressionsmanschetten nicht an Beinen, die die Umfangswerte der Größe XL überschreiten (s. Tabelle).

Bitte achten Sie beim An- und Ausziehen der Manschetten darauf, diese nicht unnötig weit zu dehnen, da dies die Produktlebensdauer verringern kann.

**Tipp:** Insbesondere bei höheren Umgebungstemperaturen empfinden es manche Patienten als angenehm, wenn Sie die Kompressionsmanschetten „umstülpen“, so dass die frottierte Seite nach außen zeigt und die glatte Seite zur Haut hin getragen wird.

#### Wasch- und Pflegehinweise:

Durch den Waschvorgang auch bei Handwäsche kann es zu einer deutlichen Beeinträchtigung des optischen Erscheinungsbildes kommen. Das Waschen der Kompressionsmanschetten wird nicht empfohlen.

