

FLÄCHE/GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCODERM
PADS



PREVENT

STERILE, ALKOHOLISCHE DESINFEKTIONSTÜCHER

1 / 4

Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung

Zur Anwendung an Medizinprodukten
wie Ventilmembran-Konnektoren

Praktische Entnahme der alkoholischen Tupfer aus den Einzelsachets



FLÄCHE/GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCODERM
PADS



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 4

DESCODERM PADS sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten.
DESCODERM PADS ermöglichen bei der Desinfektion und Reinigung von Ven-

tilmembran-Konnektoren eine praxisnahe und zeitsparende sowie aufgrund der vorhandenen Sterilität des Produkts, eine wirksame Anwendung. Die Tücher sind einzeln in einem praktischen Sachtet verpackt.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Medizinprodukten (Ventilmembran-Konnektoren).

Anwendung

Flächendesinfektion von Medizinprodukten (Ventilmembran-Konnektoren): Flächen bis zur vollständigen Benetzung abwischen und für 1 min abtrocknen lassen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Produkt bei geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht verwenden. Produkt ist in Endverpackung mittels Gamma-Strahlung sterilisiert.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polyethylenterephthalat (PET) und Polymethylmethacrylat (PMMA).

Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Kupfer, Messing und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Propan-2-ol. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

FLÄCHE/GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCODERM
PADS



PREVENT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 4

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			15 s	30 s	1 min
Bakterien und Hefen					
Anwendungsempfehlung zur Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten (Konnektoren) ¹	EN				•
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	•		
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		•	
behüllte Viren					
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•		
Ergänzende Prüfergebnisse					
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung	•		
	EN 16615	hohe Belastung			•
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	•		
	EN 16615	hohe Belastung			•

¹ – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

FLÄCHE/GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCODERM
PADS



PREVENT

GEBINDE

4 / 4

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Größe	Art. Nr.	PZN
DESCODERM PADS	Einzelsachet	12	100 Sachets	6 x 8 cm	00-401-T100-01	14374922

STERILE R



CE 0123

ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

*Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.*