

Produkttitel: Medizinischer Mānuka Wundheilhonig

PZN: 16586456

PZN A: 5308808

Inhalt: 30 g

Herkunft: Neuseeland

Mānuka Wundheilhonig besteht zu 100% aus Mānuka-Honig medizinischer Qualität. Zur sicheren Anwendung auf geschädigter Haut und offenen Wunden wird er sterilisiert. Er lässt sich leicht und gleichmäßig auftragen.

Mānuka Wundheilhonig besitzt stark antibakterielle, zellerneuernde Eigenschaften und unterstützt die Wundheilung. Narbenbildung kann vorgebeugt werden. Gleichzeitig ist er sanft zur Haut.

Die Wirkung von Mānuka Wundheilhonig

1. Reinigung

Manuka Wundheilhonig wirkt wundreinigend durch seine osmotische Fähigkeit, dem Gewebe Flüssigkeit zu entziehen. So wird abgestorbenes Gewebe aus der Wunde gespült und die Wunde auf natürliche Weise gereinigt.

2. Schutz

Die wissenschaftlich belegte, antibakterielle Wirksamkeit von Manuka Wundheilhonig sorgt für einen natürlich-effektiven Schutz vor einer Vielzahl von Bakterien und reduziert die Infektionsgefahr.

3. Wundheilung

Unter dem Honigverband entsteht ein feuchtes und antibakterielles – optimales - Wundmilieu. So wird neues Bakterienwachstum gehemmt, die Bildung neuer Zellen gefördert und die Narbenbildung kann maßgeblich reduziert werden.

Zusätzlich pflegt der Honig die Wundumgebung, beruhigt und schützt die Haut.

Mānuka Wundheilhonig „Erste Hilfe“ aus der Natur

- 100 % NATÜRLICH – Ohne Zusatz von Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen.
- 100 % medizinischer Mānuka-Honig aus Neuseeland
- Wirksamkeit klinisch belegt
- Für die ganze Familie
- Medizinprodukt

Anwendungsgebiete:

- Kleinere Schnittwunden
- Kleinere Schürfwunden
- Leichte Verbrennungen

Anwendung:

Medizinischer Mānuka Wundheilhonig lässt sich leicht und gleichmäßig auftragen.

Auf den gereinigten Wundbereich auftragen und mit einem sterilen Verband abdecken. Hinweise auf der Verpackung beachten.

Hinweise:

Nur laut Anweisung verwenden. Nicht verwenden bei bekannten Allergien gegen Honig oder Bienenprodukten. Nicht zum Verzehr geeignet.

Wundheilhonig ist ein Naturprodukt. Kleine Kristalle im Honig beeinflussen weder die Wirkung noch die Qualität.

Kontraindikationen:

- Es gibt keine bekannten Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel bei Patienten mit Diabetes aufgrund der Verwendung von Mānuka Wundheilhonig. Jedoch ist es ratsam, den Blutzuckerspiegel während der Verwendung zu überwachen.
- Vorübergehend erhöhte Schmerzen können aufgrund osmotischer Wirkung und/oder des niedrigen pH-Wertes von Honig auftreten. Wenn die Schmerzen anhalten, beenden Sie die Anwendung und reinigen Sie die Wunde vorsichtig mit steriler Kochsalzlösung.

Inhaltsstoffe:

100 % medizinischer, antibakterieller Mānuka-Honig aus Neuseeland