



# Medizinische Desinfektions-Tücher

Medizinprodukt

**Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.**

SOS Medizinische Desinfektions-Tücher desinfizieren Oberflächen von kleinen alkoholbeständigen Medizinprodukten (z. B. Injektionspens inkl. Zubehör) und reinigen die intakte Haut. Die mit einer alkoholischen Lösung (70 % v/v iso-Propanol) getränkten Tücher beseitigen 99,99 % der Viren\*, Bakterien und Pilze. Die SOS Medizinischen Desinfektions-Tücher sind einzeln verpackt und gewährleisten so auch eine schnelle Hilfe für unterwegs.

\* Wirksam gegen alle behüllten Viren wie alle Grippeviren, Vakziniaviren, HBV, HIV, HCV (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV Leitlinie mit BVDV/Vakzinia-Virus), bakterizid, tuberkulozid und levurozid.

## Anwendungsgebiete:

Zur Oberflächendesinfektion von kleinen alkoholbeständigen Medizinprodukten (z. B. Injektionspens inkl. Zubehör) sowie zur Reinigung der intakten Haut.

## Anwendung:

Flächen bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

## Einwirkzeit:

1 min.

## Anwendungshinweise:

Produkt bei geöffneter oder beschädigter Verpackung nicht verwenden. Produkt ist in Endverpackung mittels Gamma-Strahlung sterilisiert. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem

Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

## Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol. Ingredients: Aqua, Isopropyl Alcohol.

## GEFAHR

Propan-2-ol

Entzündbarer Feststoff. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



**Stand der Information:** August 2020



## Hersteller:

Dr. Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3  
D-34323 Malsfeld  
Tel.: 05664/9496 0











CE 0482

## Vertrieb:

DISTRICON GmbH  
Am Josoph 15  
D-61273 Wehrheim



## Bedeutung der Symbole auf Packung:

-  Hersteller
-  Herstellungsdatum
-  Nicht wiederverwenden
-  Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
-  Temperaturbegrenzung
-  Verwendbar bis
-  Chargenbezeichnung
-  Gebrauchsinformation beachten
-  Medizinprodukt
-  Sterilisation durch Bestrahlung

399\_REV01/G01