

Otri-Natural

OtriNatural Nasenreinigung Soft

100 ml

OtriNatural Nasenreinigung Strong

125 ml

OtriNatural Nasenreinigung ist eine isotonische Meerwasserlösung (0,9 % NaCl), die von Natur aus reich an Mineralsalzen und Spurenelementen des Meeres ist. Es reinigt die Nasenhöhlen, spült überschüssigen Schleim und im Schleim enthaltene Verunreinigungen wie Krankheitserreger, Allergene und Schadstoffe aus und hilft, die Nase gesund zu halten und sekundären HNO-Infektionen vorzubeugen. OtriNatural Nasenreinigung hilft, nasale Beschwerden wie Verstopfung und Schleimabsonderung zu lindern, die z. B. durch Erkältungen und Allergien verursacht werden, und die Nasenatmung zu verbessern. Außerdem befeuchtet es die Nasenschleimhaut bei Trockenheit.

Indikationen:

- Zur täglichen Hygiene der Nasenhöhlen zur Entfernung von Schleim, Krankheitserregern (z. B. Viren, Bakterien), Allergenen (z. B. Pollen, Hausstauballergene), Schadstoffen (z. B. Luftverschmutzung, Tabak), Staub und anderen potenziell schädlichen Partikeln (mechanische Wirkung)
- Zur Linderung von nasalen Beschwerden (z. B. Verstopfung, Schleimabsonderung), verursacht durch z. B. Erkältungen und Allergien, Rhinosinusitis oder nach einer endonasalen Operation
- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut und Linderung von Trockenheit

OtriNatural Nasenreinigung kann auch in Kombination mit abschwellenden topischen Arzneimitteln verwendet werden, vorzugsweise unmittelbar vor deren Anwendung. Geeignet während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Zusammensetzung:

Meerwasser 28 %, gereinigtes Wasser 72 % (1 ml Lösung enthält 0,28 ml Meerwasser), entspricht 0,9 % Natriumchlorid (NaCl). Frei von Konservierungsstoffen oder anderen chemischen Zusätzen. 100 % natürlich.

Inertes Treibgas (Stickstoff), nicht in Kontakt mit der Lösung.

Beschreibung:

- **OtriNatural Nasenreinigung Soft 100 ml:**
Der weiße Sprühkopf mit Schutzspitze ermöglicht ein sanftes Sprühen und Spülen. Für jeden geeignet, einschließlich Babys.
- **OtriNatural Nasenreinigung Strong 125 ml:**
Der blaue Sprühkopf erzeugt einen stärkeren Strahl für eine intensive Spülung. Geeignet ab 2 Jahren.

Empfohlene Dosierung:

- **OtriNatural Nasenreinigung Soft 100 ml (weißer Sprühkopf mit Schutzspitze):**
Ab 0 Jahren: 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 3-mal täglich.
Alle Altersgruppen ab 6 Jahren: 1-3 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 4-mal täglich.
- **OtriNatural Nasenreinigung Strong 125 ml (blauer Sprühkopf):**
Ab 2 Jahren: 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 3-mal täglich.
Alle Altersgruppen ab 6 Jahren: 1-3 Sprühstöße in jedes Nasenloch, 2- bis 4-mal täglich

Nebenwirkungen:

Zu Beginn kann ein stechendes Gefühl oder eine vorübergehende Reizung auftreten.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Überempfindlichkeit gegen Meerwasser nicht verwenden. Nur zur Anwendung in der Nase. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Aufbewahrungshinweise:

Unter 25 °C lagern. Der Inhalt steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Vor Sonnenlicht und Hitze schützen. Nicht durchstechen oder verbrennen.

Gebrauchsanweisung:

Erwachsene & Kinder:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe und setzen Sie den Sprühkopf auf die Flasche.
2. Beugen Sie sich über ein Waschbecken und neigen Sie den Kopf sanft zur Seite.
3. Führen Sie die Spitze des Sprühkopfes vorsichtig in das obere Nasenloch ein.
4. Drücken Sie den Sprühkopf ganz nach unten, um eine ausreichende Menge Lösung freizusetzen.
5. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
6. Schnäuzen Sie die Nase.
7. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser aus. Teilen Sie das Spray nicht mit anderen Personen, da Infektionen übertragen werden können.



Babys & Kleinkinder:

1. Entfernen Sie die Schutzkappe und setzen Sie den Sprühkopf auf die Flasche.
2. Legen Sie das Baby auf den Rücken, neigen Sie den Kopf sanft zur Seite und halten Sie es in dieser Position.
3. Führen Sie die Spitze des Sprühkopfes vorsichtig in das obere Nasenloch ein.
4. Drücken Sie den Sprühkopf ganz nach unten, um eine ausreichende Menge Lösung freizusetzen.
5. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
6. Bringen Sie das Baby wieder in eine aufrechte Position, lassen Sie die Lösung abfließen und wischen Sie die Nase ab.
7. Spülen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung mit warmem Wasser aus. Teilen Sie das Spray nicht mit anderen Personen, da Infektionen übertragen werden können.




OtriNatural Produkte sind Medizinprodukte, die den Anforderungen der Richtlinie 93/42 der Europäischen Gemeinschaft entsprechen.



Gerolymatos International S.A.
8 Asklipiou St.
14568 Kryoneri, Athen
Griechenland

Vertrieb:

Haleon Germany GmbH
80258 München
Tel.: 0800 664 5626
E-Mail: mystory.de@haleon.com

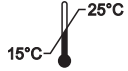

Marken sind Eigentum der Haleon Unternehmensgruppe oder an diese lizenziert.
© 2024 Haleon oder Lizenzgeber