

Gebrauchsanweisung

KOCHSALZLÖSUNG 0,9%

Sterile isotonische Natriumchloridlösung 0,9 % in Einzeldosisampullen zur Nasen- und Augenreinigung, Ohrensplüfung, Wundreinigung und Inhalation.

STERILE A

NICHT ZUR INJEKTION GEEIGNET.

ANWENDUNGSGEBIETE

KOCHSALZLÖSUNG 0,9% ist für Säuglinge, Kinder und Erwachsene geeignet zur:

- Nasenhygiene: durch Einträufeln oder Spülung (Auswaschen) trockener oder verstopfter Nasen,
- Augenhygiene: durch Einträufeln, Spülung oder Bäder,
- Ohrhygiene,
- Wundreinigung,
- Inhalation bei Aerosoltherapie.

DARREICHUNGSFORM

Verpackung mit 20 Einzeldosisampullen zu je 5 ml.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumchlorid 0,9 g
Gereinigtes Wasser ad 100 ml
Ohne Konservierungsstoffe.

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Die Hände vor der Anwendung sorgfältig waschen. Eine Einzeldosisampulle abtrennen und den oberen Teil abdrehen, um sie zu öffnen.

FÜR DIE AUGEN- UND NASENHYGIENE

Das Produkt kann täglich für die Augen- und Nasenhygiene verwendet werden, je nach Bedarf für ein bis sechs Spülungen am Tag.

Für die Anwendung an der Nase: durch Einträufeln oder Spülung (Auswaschen) trockener oder verstopfter Nasen

Den Kopf zur Seite neigen. Die Spitze der Ampulle vorsichtig in das Nasenloch einführen und leicht auf die Einzeldosisampulle drücken. Den Vorgang für das andere Nasenloch wiederholen. Den Kopf wieder in eine aufrechte Position bringen, um das Sekret abfließen zu lassen und danach überschüssige Flüssigkeit abwischen. In den ersten zehn Minuten nach der Anwendung nicht kräftig schnäuzen. Bei Säuglingen das Produkt mit minimalem Druck einträufeln, um das Risiko einer Kontamination des Mittelohrs zu vermeiden.

Für die Anwendung am Auge: durch Einträufeln, Spülung oder Bäder

Einige Tropfen der Lösung in jedes Auge träufeln. Die überschüssige Flüssigkeit mit einem sterilen Tupfer abwischen. Die Einzeldosisampulle nicht mit der Augenoberfläche in Kontakt bringen. Wenn ein weiteres Augenprodukt verwendet wird, zuerst KOCHSALZLÖSUNG 0,9% verwenden und dann 15 Minuten warten, bevor das andere Produkt eingeträufelt wird. Die Lösung kann zusammen mit Kontaktlinsen verwendet werden.

Für die Ohrhygiene: zum Spülen

Für eine ordnungsgemäße Ohrenhygiene kann das Produkt nach Gebrauch einer Reinigungslösung mit oberflächenaktiven Substanzen verwendet werden, um gelöste Ohrenschmalzrückstände zu entfernen und den äußeren Gehörgang zu spülen. Eine Einzeldosisampulle kann für beide Ohren verwendet werden. Die überschüssige Flüssigkeit mit einem Tupfer abwischen.

Für die Wundreinigung:

Die Wunde mit der gesamten Lösung aus der Einzeldosisampulle spülen. Die überschüssige Flüssigkeit nur von der gesunden Haut abwischen. Die Einzeldosisampulle nicht mit der Wundoberfläche in Kontakt bringen.

Für die Inhalation bei Aerosoltherapie:

Wird die Lösung als Lösungsmittel in der Inhalation verwendet, ist den Anweisungen des zu inhalierenden Produkts zu folgen. Wird die Lösung allein verwendet, ist den Anweisungen des Aerosolgeräts zu folgen. Bei erstmaliger Anwendung oder bei Überempfindlichkeit der Atemwege den Arzt konsultieren.

Fortsetzung auf der Rückseite



SCHWARZHAUPT PHARMA

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

- Nur für den einmaligen und persönlichen Gebrauch.
- Nach dem Öffnen sofort verwenden und die Einzeldosisampulle nach Gebrauch entsorgen.
- Die gleiche Einzeldosisampulle nicht für verschiedene Anwendungen nutzen.
- Nicht zur Injektion geeignet.
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Nicht verwenden, wenn die Einzeldosisampulle beschädigt ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Geöffnete Einzeldosisampullen dürfen nicht wiederverwendet werden: Da das Produkt keine Konservierungsstoffe enthält, besteht bei einer Wiederverwendung das Risiko, eine kontaminierte Lösung zu verabreichen.

KOCHSALZLÖSUNG 0,9% ist ein steriles Medizinprodukt der Klasse IIa.

Datum der CE-Kennzeichnung: 16.09.2016

Revisionsdatum der Gebrauchsanweisung: 09/2017



HERSTELLER

Laboratoire UNITHER
151, Rue André Durouchez
Espace Industriel Nord
CS 28028
80084 Amiens Cedex 2 - FRANKREICH

VERTRIEB

Schwarzhaupt Pharma GmbH
Salierring 48
50677 Köln
DEUTSCHLAND

CE 0459

Hergestellt in Frankreich