



Mit
Redraphen
Pflanzlicher Komplex

ERWACHSENE
UND KINDER
6+ MONATE



BEI REIZUNG DER NASE UND
DES ÄUSSEREN NASENBEREICHS

**Wirkt Reizungen entgegen, schützt und regeneriert
die Nasenschleimhaut sowie die Haut um die Nase herum**

BIO-SALBE

Fitonasal Bio-Salbe ist ein Medizinprodukt, das **Reizungen und Trockenheit der Nasenschleimhaut sowie der Haut um die Nase herum** auf physiologische Weise entgegenwirkt. Ihre **indirekt schützende und entzündungshemmende Wirkung** entsteht durch folgende Wirkmechanismen:

Barrierewirkung



Befeuchtende
Wirkung

Antioxidative
Wirkung

- **Barrierewirkung:** Durch die Bildung eines entzündungshemmenden Schutzfilms auf der Nasenschleimhaut sowie der Haut um die Nase herum wird der Kontakt mit externen Reizstoffen eingeschränkt.
- **Befeuchtende Wirkung:** Zur Förderung der Wiederherstellung des hydrolipidischen Gleichgewichts des Gewebes und zur Vorbeugung vor Austrocknung.
- **Antioxidative Wirkung:** Zur Verringerung der freien Radikale, die durch die Schleimhautentzündung erzeugt werden.

Fitonasal Bio-Salbe fördert zudem die **Genesung und die Regeneration der Nasenschleimhaut, sowie die Heilung von Abschürfungen und Rissen der Haut um die Nase herum**. Das Produkt trägt dazu bei, die Nase länger frei zu halten, unterstützt den Ausgleich der Schleimsekretion und sorgt für ein angenehmes Frischegefühl. Die Linie wird ergänzt durch Fitonasal Kinder für die gründliche Reinigung der Nasenhöhlen und Fitonasal Nasenspraykonzentrat, besonders geeignet bei akuter Nasenverstopfung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Fitonasal Bio-Salbe ist zur **Behandlung** folgender Fälle angezeigt:

- **Reizung der Nasenschleimhaut** durch Rhinorrhoe (laufende Nase) bei Erkältung und verschiedenen Formen von akuter und chronischer Rhinitis;
- **Trockenheit und eine dünnere Nasenschleimhaut** aufgrund von akuten und chronischen pathologischen Beschwerden (wie Sinusitis, allergische Rhinitis, vasomotorische Rhinitis), von pharmakologischen Behandlungen (wie abschwellende Nasensprays, Kortikoide, Antihistaminika), von Kontakt mit externen Reizstoffen (wie Mikroorganismen, Staub, Rauch, Smog, Pollen, kalte Luft) sowie vom Aufenthalt in trockenen oder zu stark beheizten Räumen;
- **Reizungen, Risse und Abschürfungen in der Nase und auf der Haut im äußeren Nasenbereich**, verursacht durch übermäßigen Schleim und häufiges Reiben.

Kann auch **vorbeugend** in Situationen verwendet werden, die Trockenheit verursachen können und vor längeren sportlichen Aktivitäten. Ab 6 Monaten.

ANWENDUNGSHINWEISE

Es wird empfohlen, je nach Alter und Größe der Nasenlöcher eine ausreichende Menge an Produkt auf den Finger zu geben (etwa eine Kaffeebohne für Erwachsene und etwa die Hälfte für Kinder). Im Inneren der Nase auftragen und von unten nach oben sanft einmassieren. Bei Reizungen, Rissen und kleinen Abschürfungen auch auf die Haut um die Nase herum auftragen.



Das Produkt nach einer gründlichen Reinigung der Nase anwenden (vorzugsweise nach einer Nasenspülung). Die Anwendung drei- bis viermal täglich wiederholen, insbesondere am Abend vor dem Schlafengehen. Bei einer Therapie mit anderen Produkten zur Anwendung in der Nase, sollten 10–15 Minuten Abstand zwischen den beiden Anwendungen eingehalten werden. **Fitonasal Bio-Salbe** kann auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt oder Apotheker zu Rate ziehen.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Bio-Salbe enthält: **Redraphen** (pflanzlicher Komplex) 6 mg, bestehend aus **Harzen und Polysacchariden** (Weihrauchextrakt und dehydriertes Gel aus Blättern der Aloe Vera*), Jojobaöl* 146 mg, Wasser, Saccharosestearat, Saccharosediostearat, Glycerinstearat, Cetylalkohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Xanthangummi, Zitronensäure, Tocopherole, Natriummetasilikat, Benzylalkohol, Natriumdehydroacetat, Sonnenblumenöl und ätherisches Lavendelöl.

*Inhaltsstoff aus biologischem Anbau

Ohne Eukalyptol und Menthol. Frei von SLS und SLES, Parabenen, PEG, synthetischen Farb- und Duftstoffen. Ohne GVO.

Fitonasal Bio-Salbe wird mittels der nachstehenden Parameter kontrolliert, wodurch Aboca die Qualität der natürlichen Produkte in ihrer Gesamtheit garantiert.

1. Digitaler metabolomischer Fingerabdruck mit NIRS-Technologie (Nahinfrarotspektroskopie)

zur Bestätigung des validierten Fertigungsprozesses natürlicher Produkte

2. Adhäsionstest

zur Bestätigung der Barriere- und Schutzwirkung auf die Nasenschleimhaut

HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei schweren Verletzungen der Schleimhaut und Nasenbluten nicht anwenden. Bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden.

NEBENWIRKUNGEN

Fitonasal Bio-Salbe ist in der Regel gut verträglich. Sollten dennoch Nebenwirkungen auftreten, die sich auf das Produkt oder dessen Anwendung zurückführen lassen, informieren Sie Ihren Arzt und/oder Apotheker sowie den Hersteller Aboca, dessen Kontaktdaten Sie in dieser Packungsbeilage finden. Bei schwerwiegenden Vorkommnissen informieren Sie bitte auch die zuständigen Behörden in Ihrem Land.

ÜBERDOSIERUNG

Aufgrund derzeit verfügbarer Daten sind in der Allgemeinbevölkerung keine Überdosierungserscheinungen bekannt oder zu erwarten.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MEDIZINPRODUKTEN, ARZNEIMITTELN ODER LEBENSMITTELN

Aufgrund derzeit verfügbarer Daten sind keine Wechselwirkungen von **Fitonasal Bio-Salbe** mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder Lebensmitteln zu erwarten.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT

Bei Zimmertemperatur lagern und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das unversehrte und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt. Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 6 Monaten nach dem Öffnen zu verwenden. Die Verpackung bitte aufbewahren.

VERKAUFSPACKUNG: 10 ml Tube

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 12/2025



VERPACKUNGSMATERIALIEN

Für die Abfallentsorgung überprüfen
Sie bitte die Vorschriften Ihres Wohnorts.

Faltschachtel PAP 21 > Papier
Packungsbeilage PAP 22 > Papier
Tube ALU 41 > Aluminium
Verschluss HDPE 2 > Plastik

MEDIZINPRODUKT Klasse IIa



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

DELEA_FINA2POX-A